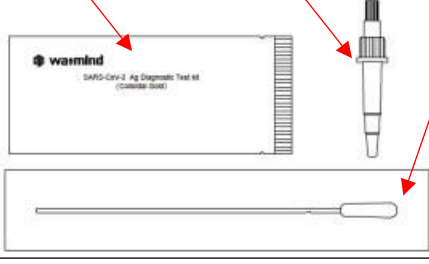

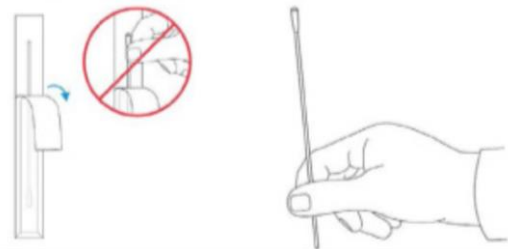


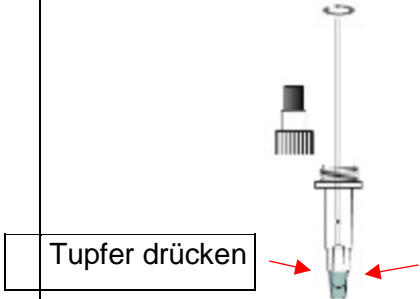
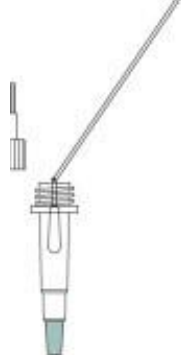


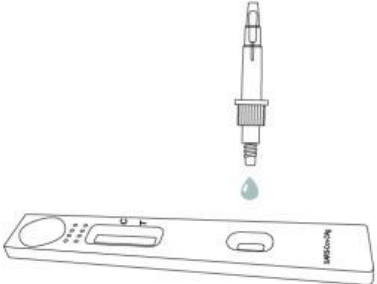


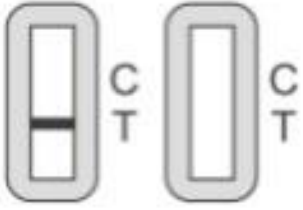
اختبار
الكاسيت

آلة النفخ

مسحة
= مصاصة

1		<p>اختبار الكاسيت في كيس رقائق 1 أنبوب مع 1 مسحة سائلة</p>
2		<p>افتح كيس الرقائق المعدنية الخاص بك على طاولة نظيفة. ملاحظة: لا تلمس خرطوشة.</p>
3		<p>افتح المسحة ملاحظة: لا تلمس نهاية المسحة</p>
4		<p>لا تأكل أو تشرب أو تغسل أسنانك أو تمضغ العلكة أو الحلوى وما إلى ذلك قبل 30 دقيقة. مسحة في الفم: ادفع اللسان للخلف وللأعلى. يتجمع اللعاب تحت اللسان. أمسك المسحة في اللعاب لمدة 10 ثوان ، مع الدوران حتى تصبح مبللة تماماً (مبللة).</p>
5		<p>الأنبوب له غطاءان. الغطاء السفلي سميك وأرجواني. الغطاء العلوي أرق وأبيض. قم أولاً بإزالة الغطاء السفلي السميك الأرجواني.</p>

6		<p>أدخل المسحة في الأنبوب. اغمس المسحة في السائل. اضغط بالمسحة بقوة في السائل أثناء تدوير المسحة في السائل. استخدم المسحة لضغط الأنبوب بأصابعك ، وبالتالي عصر المسحة للخارج</p>
7		<p>قطع المسحة وتركها في الأنبوب</p>
8		<p>لعمل الأنابيب ، قلب الأنابيب 5 مرات.</p>
9		<p>افتح الغطاء الأبيض الرفيع على الأنبوب</p>
10		<p>ضع 3 قطرات على الفتحة الصغيرة في الكاسيت</p>

11		<p>انتظر 15 دقيقة ملاحظة: لا تحرك الكاسيت ، لا تنتظر أكثر من 15 دقيقة</p>
12		<p>نتيجة سلبية</p>
13		<p>نتيجة ايجابية</p>
14		<p>نتيجة غير صحيحة</p>