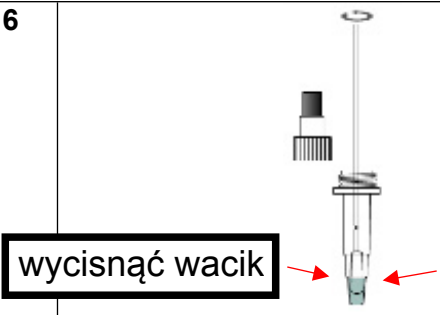
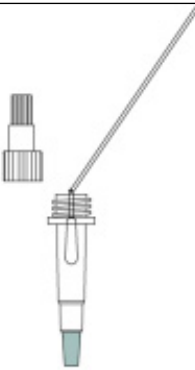

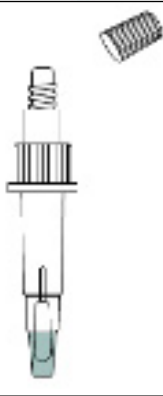
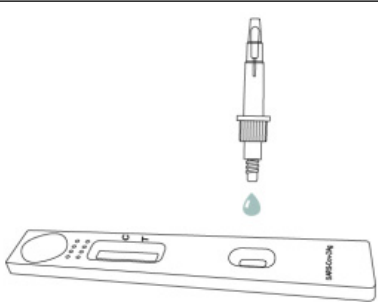


Kaseta testowa	Rurka z płynem	Patyczek do wymazu
----------------	----------------	--------------------

1		<p>Potrzebujemy:</p> <ul style="list-style-type: none"> -kaseta testowa w szczelnym opakowaniu -rurka z płynem -patyczek do wymazu
2		<p>Wyjmij kasetę testową z opakowania i połóż ją na oczyszczonej powierzchni.</p> <p>Uwaga: Nie dotykać paska testowego.</p>
3		<p>Otwórz opakowanie z patyczkiem do wymazu.</p> <p>Uwaga: Nie dotykać strony materiałowej.</p>
4		<p>30 minut przed: Nie jedz, nie pij, nie myj zębów, nie żuj gumy do żucia, nie jedz słodczy itp.</p> <p>Wymaz w ustach: Podnieś język i włóż patyczek testowy pod język. Obracaj nim 10 sekund pod językiem aż będzie mokry (przemoczony).</p>
5		<p>Rurka ekstrakcyjna z płynem ma dwie nakrętki. Dolna nakrętka jest grubsza i fioletowa. Górna jest cieńsza i biała. Najpierw odkręć dolną fioletową</p>

<p>6</p>		<p>Patyczek umieść w rurce i zanurz w płynie. Mocno wciśnij patyczek i obracaj nim w płynie. Następnie naciśnij probówkę palcami wyciskając w ten sposób wacik.</p>
<p>7</p>		<p>Patyczek testowy ułamać i pozostawić w rurce.</p>
<p>8</p>		<p>Teraz zakręć fioletową nakrętkę i mieszaj całość 5 razy ruchem okrężnym.</p>
<p>9</p>		<p>Odkręć teraz białą górną nakrętkę.</p>
<p>10</p>		<p>Wyciśnij z rurki 3 krople na małe okienko kasety testowej.</p>

11		<p>Oczekaj 15 minut (nie dłużej i nie krócej).</p> <p>Uwaga: Nie ruszaj w tym czasie kasety.</p>
12		<p>Negatywny wynik</p>
13		<p>Pozytywny wynik</p>
14		<p>Nieważny wynik</p>