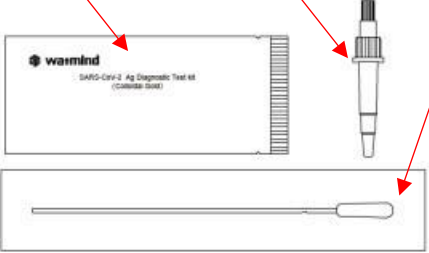

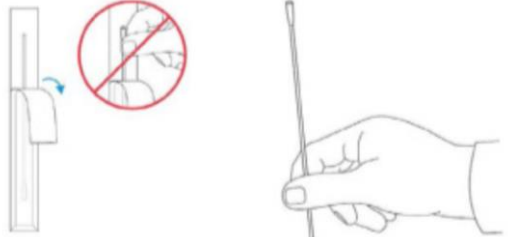


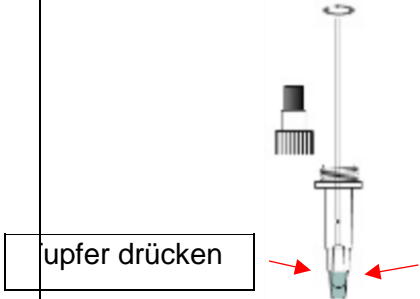
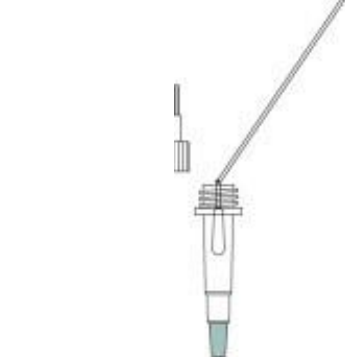


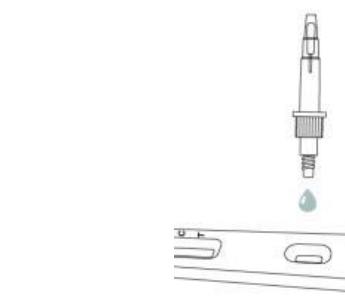


Testkassette Röhrchen Tupfer=Lolli

<p>1</p>		<p>1 Casete en envoltorio de plastico 1 Tubo con liquido reactivo 1 Bastoncillo</p>
<p>2</p>		<p>Abra el envoltorio de plastico y coloque el Casete sobre una superficie limpia y seca. ADVERTENCIA: No toque ninguno parte sobre El casete.</p>
<p>3</p>		<p>Abra el Bastoncillo ADVERTENCIA: No tocar el final del bastoncillo</p>
<p>4</p>		<p>30 Minutos antes no comer, beber, la varse los dientes, mascar chicle, caramelos etc. Bastoncillo en la boca: Lengua hacia atras y presionar arriba Debajo de la lengua coger saliva Mantener el bastoncillo en la saliva Girando, hasta que este completamente humedo. (Empapado)</p>
<p>5</p>		<p>El tubo tiene dos tapas. La tapa de abajo es mas gruesa y morada. La tapa de arriba es mas fina y blanca. Quitar primero la tapa morada, mas gruesa, de abajo.</p>

<p>6</p>		<p>Introducir el bastoncillo en el tubo sumergir el bastoncillo en el liquido reactivo presionar fuerte el bastoncillo en el liquido y girar.</p> <p>Dejar el bastoncillo en el liquido Presionar con los dedos el bastoncillo con el tubo, estrujando el bastoncillo.</p>
<p>7</p>		<p>Doblar el bastoncillo y dejarlo en el tubo (parte de algodón)</p>
<p>8</p>		<p>Cerrar el tubo Agitar el tubo 5 veces</p>
<p>9</p>		<p>Abrir la tapa blanca fina del tubo</p>
<p>10</p>		<p>Dejar caer 3 gotas sobre el pequeno agujero del casete</p>

<p>11</p>		<p>Esperar 15 minutos</p> <p>ADVERTENCIA: No mover el casete</p> <p>Poner una alarma</p> <p>No esperar mas de 15 minutos</p>
<p>12</p>		<p>Resultado negativo</p>
<p>13</p>		<p>Resultado positivo</p>
<p>14</p>		<p>Resultado no valido</p>