
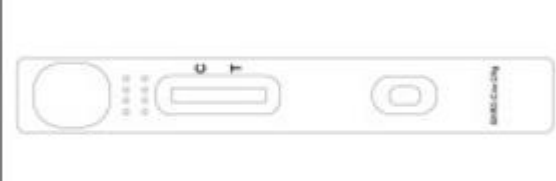
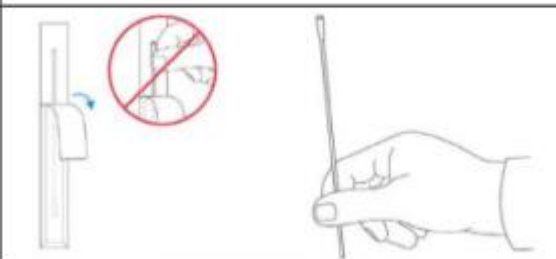
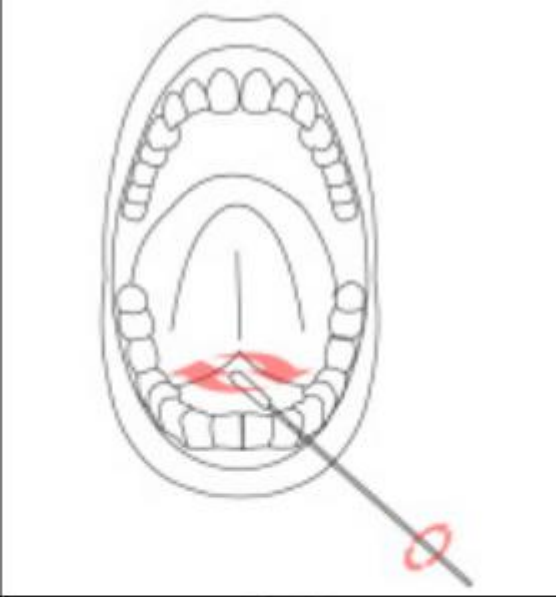

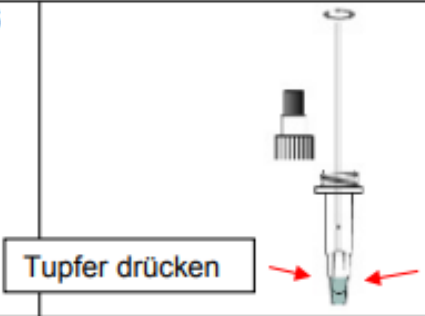



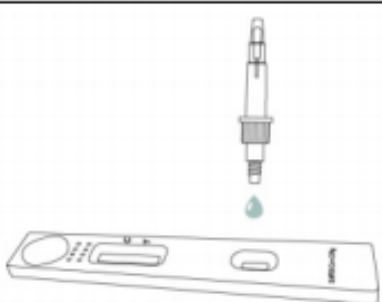


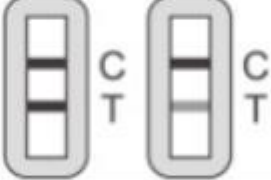
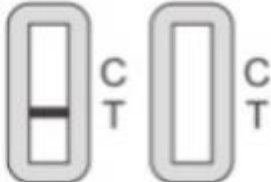


	Testkassette	Röhrchen	Tupfer=Lolli	
1				<p>1. Deschideți pachetul de testare și verificați conținutul: 1 casetă de testare într-o pungă de folie sigilată 1 tub cu soluție de extracție a probei 1 tampon.</p>
2				<p>2. Deschideți punga și așezați caseta pe o suprafață curată, uscată și plană. Notă: Nu atingeți nici o piesă din interiorul cardului.</p>
3				<p>3. Deschideți tamponul Deschideți pachetul de tampoane și scoateți tamponul. Notă: Țineți degetele la distanță de capătul tamponului.</p>
4				<p>4. Vă rugăm să nu mâncați și să nu beți nimic, inclusiv gumă de mestecat sau produse din tutun, timp de 30de minute înainte de prelevarea probei.</p> <p>Colectarea de probe de salivă: Apăsați vârful limbii pe rădăcina inferioară a maxilarului pentru a concentra saliva (= Împingeți limba însus, spre spate). Așezați tamponul steril de unică folosință sub limbă timp de cel puțin 10 secunde, rotiți-l de 5 orisau mai mult și saturați-l complet.</p> <p>Notă: Pot apărea rezultate falsnegative dacă saliva nu este colectată corespunzător.</p>
5				<p>5. Deschideți capacul inferior al tubului preumplut cu soluția de colectare a probei.</p>

<p>6</p>		<p>6. Pregătirea probelor din tampoane</p> <p>Introduceți tamponul în tubul de probă și apoi scufundați complet capul tamponului în probă. Se amestecă puternic soluția prin rotirea viguroasă a tamponului pe partea laterală a tubului de cel puțin 10 ori (în timpul imersiunii) și prin apăsarea tubului de 5 ori manual pentru a se asigura că eșantionul este complet dizolvat în tamponul de extracție a probei de pe tamponul de prelevare a probelor.</p>
<p>7</p>		<p>7. Îndoiați capul de tampon și lăsați-l în tub.</p>
<p>8</p>		<p>8. Închideți capacul inferior al tubului și învârtiți tubul de 5-6 ori</p>
<p>9</p>		<p>9. Deschideți capacul superior al tubului.</p>
<p>10</p>		<p>10. Se pun 3 picături de probă în godeul de pe casetă. Închideți capacul superior al tubului.</p>

Übersetzung Handhabung „Lolli-Test“ in RUMÄNISCHER Sprache

11		11. Așteptați 15 minute
12		12. Rezultat negativ
13		13. Rezultat pozitiv
14		14. Rezultat invalid