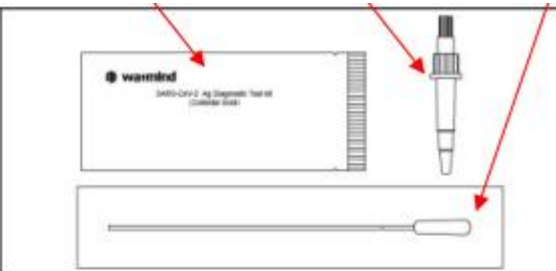
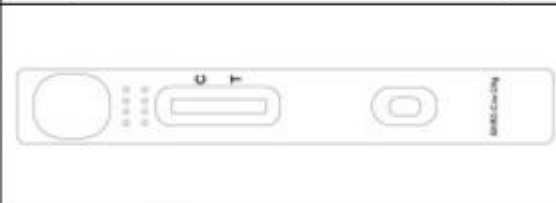
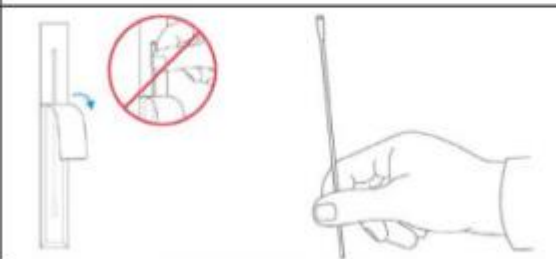
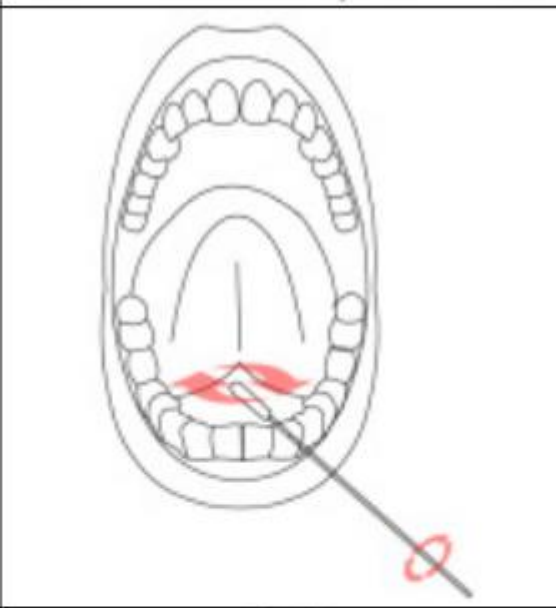



	Testkassette	Röhrchen	Tupfer=Lolli
1			
2			
3			
4			
5			

Вам необходимо:

- 1 тест-кассета в упаковке
- 1 пробирка с жидкостью
- 1 ватная палочка

Откройте упаковку и положите кассету на чистый и сухой стол.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не прикасайтесь к каким-либо частям кассеты.

Откройте упаковку со стороны держателя ватной палочки. Вытащите стерильную ватную палочку.

ПРИМЕЧАНИЕ: не прикасайтесь рукой до ватной палочки со стороны белой ваты и не кладите на иную поверхность.

30 минут до теста не есть, не пить, не чистить зубы, не жевать жвачку и не сосать конфеты.

Мазок во рту:





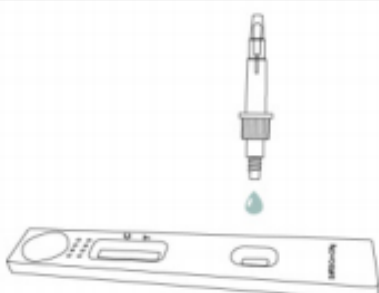
Толкайте язык назад и вверх
Слюна собирается под языком
Подержите ватную палочку в слюне 10 секунд, при этом её поворачивая, пока она не станет влажной (намокнет).

Пробирка имеет 2 колпачка

Нижняя часть более толстая и фиолетовая.
Верхняя часть более тонкая и белая.

Снимите сначала нижний, фиолетовый колпачок.

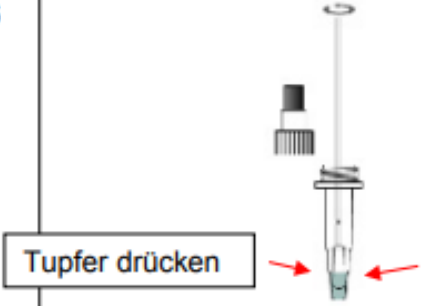Übersetzung Handhabung „Lolli-Test“ in RUSSISCHER Sprache

<p>6</p>		<p>6. Поместите ватную палочку в пробирку.</p> <p>Окуните палочку в жидкость. Плотно прижмите ватную палочку в жидкости и поверните её несколько раз.</p> <p>Оставьте ватную палочку в жидкости. Сожмите пальцами пробирку вниз, тем самым отжимая ватную палочку.</p>
<p>7</p>		<p>Отломите стерильный зонд-тампон и оставьте его в пробирке.</p>
<p>8</p>		<p>Пробирку закрыть. Поверните пробирку 5 раз.</p>
<p>9</p>		<p>Откройте тонкий, белый колпачок на пробирке.</p>
<p>10</p>		<p>Капнуть 3 капли на маленькое отверстие в кассете.</p>

Übersetzung Handhabung „Lolli-Test“ in RUSSISCHER Sprache

<p>11</p>		<p>Подождите 15 минут. ПРИМЕЧАНИЕ: Кассету не перемещать.</p> <p>Поставить будильник. Не ждите больше 15 минут.</p>
<p>12</p>		<p>Отрицательный результат</p>
<p>13</p>		<p>Положительный результат</p>
<p>14</p>		<p>Недействительный результат</p>