

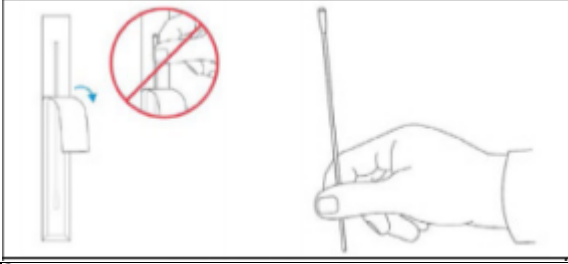
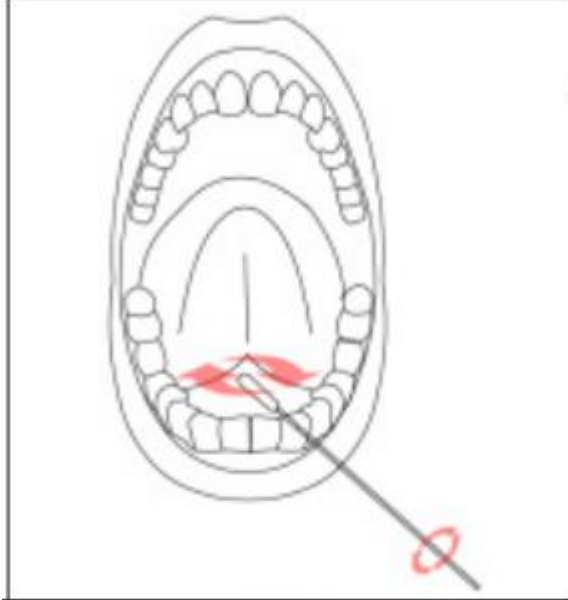

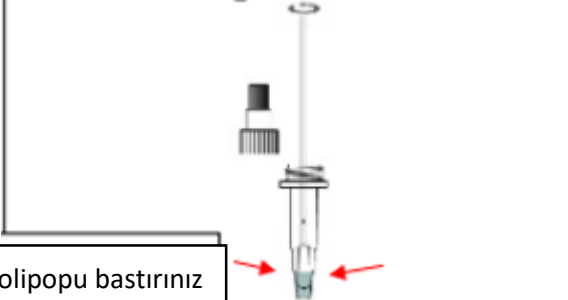
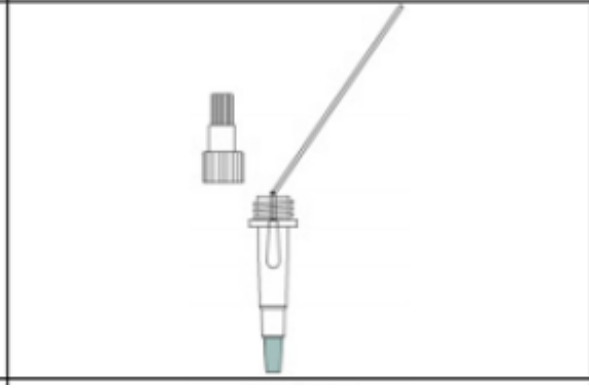


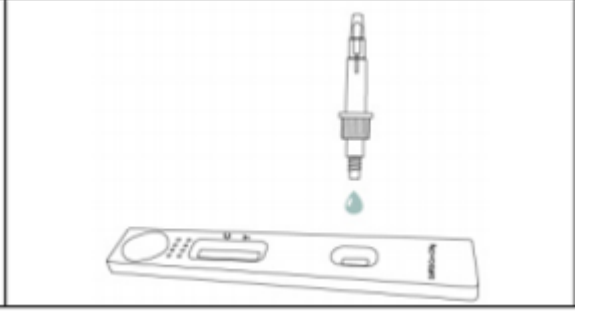

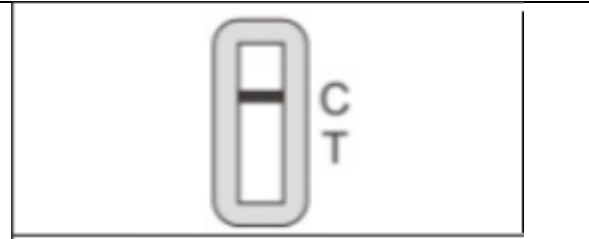


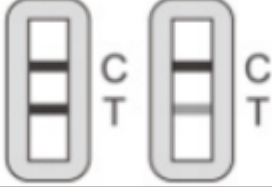
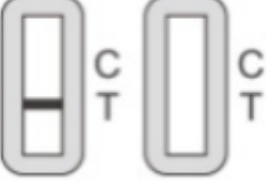
Lolli Test in TÜRKISCHER Sprache

1		Size lazım olan: 1 Folyada test kutusu 1 sıvı içinde Borucuk 1 Lolipop-çubuğu
2		Folyayı açıp kutuyu temiz ve kuru bir yüzeye koyunuz. DİKKAT: Kutunun içeriğini katiyen ellemeyiniz.
3		Çubuğu açınız DİKKAT: Çubuğun başını ellemeyiniz.
4		30 dakika evvel yemeyiniz, içmeyiniz, diş fırçalamayınız, sakız çiğnemeyiniz, şeker yemeyiniz vesaire.... Lolipop ağzın içine: Dili arkaya damağa yapıştırınız Dilin altında tükürük toplanır Lolipopu 10 saniye tutup ıslanana kadar çeviriniz (tamamen ıslanması lazım)
5		Borucuğ'un iki kapağı vardır. Aşağı kapak kalın ve mordur. Üst kapak ince ve beyazdır. İlk önce aşağıdaki kalın ve mor olan kapağı açınız.
6	 <div data-bbox="247 2056 513 2123" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">Lolipopu bastırınız</div>	Lolipop'u Borucuğ'a yerleştiriniz. Lolipop'u sıvıya daldırınız veya batırınız Lolipop'u sıvının içinde basılı tutup döndürünüz. Lolipop'u sıvının içinde bırakıp, borucuğu parmaklarınızla Lolipop ile beraber sıkınız. Lolipop'u iyice sıkıştırınız.

Lolli Test in TÜRKISCHER Sprache

7		Lolipop'u kırınız ve Borucukta bırakınız.
8		Borucuęu kapatıp 5 defa döndürünüz.
9		Borucuęun ince beyaz kapaęını açınız.
10		Kutunun küçük delikcięine 3 damla damlatınız.
11		15 dakika bekleyiniz DİKKAT: Kutuyu oynatmayınız saat kurup, 15 dakikayı geçirmeyiniz
12		Negativ sonuç

Lolli Test in TÜRKISCHER Sprache

13		Pozitiv sonuç
14		Geçersiz sonuç